



Bewegungsschiene Hall-U-Sana®

Quick Guide

Deutsch



Einstellung der Bewegungsschiene

Behandlung nur sitzend durchführen!



ACHTUNG: das Gerät nicht bewegen.
Gerät muss flach auf dem Boden liegen.

Therapiebeginn frühestens 2 Wochen nach der Operation.

1 Korrektes Platzieren des Fusses



Fuss bis an den weissen Anschlag schieben: die Zehenfalte muss gut im Kontakt mit dem senkrechten Zehentrenner (Anschlag) sein.

2 Fixierung des Fusses mittels Ristband



Ristband über dem Fuss anziehen und mit Klettverschluss fixieren.

3 Befestigung der Grosszehe auf der Zehenklappe



Grosszehe locker auf den Zehengleiter (Schlitten) legen, Zehengleiter so weit wie möglich nach hinten ziehen, Zehe mit dem Band fixieren.

Therapie

Während 30 Tagen 2 x täglich morgens und abends je 25 Min. therapieren.
Es gibt zwei vordefinierte Programme:

1 Programm 1: kleinere Auslenkung der Zehenklappe
Empfehlung: Die ersten vier bis fünf Therapietage dieses Programm wählen.



2 Programm 2: grössere Auslenkung der Zehenklappe
Ab fünftem Tag und nur wenn keine Schmerzen wählen. Bei Schmerzen: Programm 2 stoppen und weiterhin Programm 1 benutzen.



Bedienelemente

Anzeige Status und verbleibende Behandlungsdauer in Minuten

START PAUSE-Taste:
zum Ein- & Ausschalten
sowie zum Starten & Pausieren eines Programms



Anzeige Akku-Ladung
Falls  umgehend Lüdi Medical Rehab AG kontaktieren.

Tasten zur Direktwahl von Programm 1 oder Programm 2


Ablauf


1. Einschalten

Die START PAUSE-Taste 2 Sek. gedrückt halten.



2. Programmwahl

Beim Einschalten ist immer Programm 1 vorgewählt  (leuchtet grün)

Um Programm 2 zu wählen, Taste  kurz drücken (wird dann grün).

3. Gewähltes Programm starten

START PAUSE-Taste kurz drücken.

4. Not-Aus bei Schmerzen

Sofort kurz die START PAUSE-Taste drücken.

5. Ausschalten

Die START PAUSE-Taste 2 Sek. gedrückt halten.



Fehlermeldung

Fehler-Code notieren, Gerät ausschalten und umgehend Lüdi Medical Rehab AG kontaktieren.

Pflege und Rücksendung

Das Gerät nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

Nie unter fließendem Wasser oder mit Chemikalien reinigen!

Das Gerät nicht fallen lassen oder beschädigen.

Der Akku darf nicht geladen oder manipuliert werden.

Kabel kann bei falscher Geräte-Anwendung eine Stolperfalle darstellen.

Gerät immer ausserhalb der Reichweite von Kindern und immer im Koffer aufbewahren.



Nach Therapie-Abschluss umgehend Lüdi Medical Rehab AG kontaktieren, um die Rücksendung zu koordinieren (Zusatzkosten bei später Rücksendung).

Transportkarton für die Rücksendung aufbewahren.

Vermietungspartner:

Lüdi Medical Rehab AG
Hans Huber-Strasse 38
4502 Solothurn

www.luedimedical.ch

Bei Fragen:



032/626 30 90


Mo - Fr 08:00 - 12:00 und
13:30 - 17:30 Uhr

service@luedimedical.ch



Gebrauchsanweisung

Die beiliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.

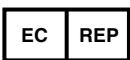

MED-RAS GmbH, Eichenallee 8H
21521 Wohltorf, Deutschland

Inverkehrbringer:
Effectum Medical AG
www.effectummedical.com



usana**medical**
www.usamedical.com