



Apparecchiatura per la mobilizzazione Hall-U-Sana®

Guida rapida Italiano



Impostazioni del apparecchiatura per la mobilizzazione

Operare solo da seduti!

ATTENZIONE:

non muovere l'apparecchio.

L'apparecchio deve essere posizionato in piano sul pavimento.

Inizio terapia: non prima di 2 settimane dall'operazione.



1

Come posizionare il piede correttamente



Inserire il piede fino al separatore verticale: la piega deve toccare bene il separatore della dita.

2

Fermare il piede tramite la cintura



Tirare la cintura sopra il piede e fissare con il velcro.

3



Fissare l'alluce sul l'lembo d'alluce mobile



Appoggiare l'alluce in modo sullo cursore per l'alluce, tirare lo cursore il più in dietro possibile, fiscare il dito con la cintura.

Terapia

Fare la terapia 2 volte al giorno per 30 giorni per 25 minuti rispettivamente la mattina e la sera. **Ci sono due programmi predefiniti:**


- 1 Programma 1: movimento meno ampio del supporto alluce**
Consiglio: Scegliere questo programma i primi quattro, cinque giorni della terapia. 
- 2 Programma 2: movimento più ampio del supporto alluce**
Scegliere a partire dal quinto giorno in assenza di dolore. In presenza di dolori: Non usare più il programma 2 e passare al programma 1. 

Comandi

Visualizzazione dello stato e dei minuti rimanenti per la terapia

Tasto START PAUSE: per accendere e spegnere e per avviare e mettere in pausa un programma



Visualizzazione livello carica della batteria
In caso di  necessità contattare **immediatamente** il proprio centro di assistenza



Tasto per selezionare il programma 1 o 2

Operazione

1. Accendere Premere il tasto START PAUSE almeno per 2 secondi.



2. Scelta del programma

Alla messa in funzione si accende sempre al programma 1  (lucina verde). Per scegliere il programma 2, premere brevemente il tasto relativo  (che s'illumina con lucina verde).

3. Avviare il programma scelto

Premere brevemente il tasto START PAUSE.

4. Arresto d'emergenza in caso di dolori Immediatamente premere brevemente il tasto START PAUSE.

5. Spegnere

Premere il tasto START PAUSE almeno per 2 secondi.



Messaggio d'errore

Annotarsi il codice d'errore, spegnere l'apparecchio, mettersi immediatamente in contatto con il proprio centro di assistenza.

Manutenzione e spedizione di ritorno

Pulire l'apparecchio solo con panno umido.

Non pulire facendolo scorrere sotto acqua corrente o utilizzando prodotti chimici!

Non far cadere o danneggiare l'apparecchio.

La batteria non può essere né caricata né maneggiata.

L'uso scorretto dell'apparecchio può posizionare il cavo in modo da causare pericolo d'inciampo.

Conservare l'apparecchio nella valigetta e fuori dalla portata dei bambini.



A terapia completa mettersi in contatto con il proprio centro di assistenza per coordinare la spedizione di ritorno (si può incorrere in costi aggiuntivi in caso di resa ritardata).

Conservare la scatola d'imballaggio per la spedizione di ritorno.

Servizio, supporto e distribuzione

Posizionare l'adesivo dell'indirizzo qui



Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate.



MED-RAS GmbH, Eichenallee 8H
21521 Wohltorf, Germania



Effectum Medical AG
Kirchgasse 11
4600 Olten, Switzerland
www.effectummedical.com



0297

usana**medical**

www.usamedical.com