



Apparecchiatura per la mobilizzazione Hall-U-Sana®

Guida rapida Italiano



Impostazioni del apparecchiatura per la mobilizzazione

Operare solo da seduti!

ATTENZIONE:

non muovere l'apparecchio.

L'apparecchio deve essere posizionato in piano sul pavimento.

Inizio terapia: non prima di 2 settimane dall'operazione.



1

Come posizionare il piede correttamente



Inserire il piede fino al separatore verticale: la piega deve toccare bene il separatore della dita.

2

Fermare il piede tramite la cintura



Tirare la cintura sopra il piede e fissare con il velcro.

3


Fissare l'alluce sul l'lembo d'alluce mobile




Appoggiare l'alluce in modo sullo cursore per l'alluce, tirare lo cursore il più in dietro possibile, fiscare il dito con la cintura.

Terapia

Fare la terapia 2 volte al giorno per 30 giorni per 25 minuti rispettivamente la mattina e la sera. **Ci sono due programmi predefiniti:**

1 Programma 1: movimento meno ampio del supporto alluce 
Consiglio: Scegliere questo programma i primi quattro, cinque giorni della terapia.


2 Programma 2: movimento più ampio del supporto alluce 
Scegliere a partire dal quinto giorno in assenza di dolore. In presenza di dolori: Non usare più il programma 2 e passare al programma 1.

Comandi

Visualizzazione dello stato e dei minuti rimanenti per la terapia


Tasto START PAUSE: per accendere e spegnere e per avviare e mettere in pausa un programma





Visualizzazione livello carica della batteria
In caso di  necessità contattare immediatamente Lüdi Medical Rehab AG

Tasto per selezionare il programma 1 o 2

Operazione

1. Accendere Premere il tasto START PAUSE almeno per 2 secondi. 

2. Scelta del programma
Alla messa in funzione si accende sempre al programma 1  (lucina verde). Per scegliere il programma 2, premere brevemente il tasto relativo  (che s'illumina con lucina verde).

3. Avviare il programma scelto
Premere brevemente il tasto START PAUSE.

4. Arresto d'emergenza in caso di dolori Immediatamente premere brevemente il tasto START PAUSE.

5. Spegnere
Premere il tasto START PAUSE almeno per 2 secondi.



Messaggio d'errore
Annotarsi il codice d'errore, spegnere l'apparecchio, mettersi immediatamente in contatto con Lüdi Medical Rehab AG.

Manutenzione e spedizione di ritorno

Pulire l'apparecchio solo con panno umido.



Non pulire facendolo scorrere sotto acqua corrente o utilizzando prodotti chimici!

Non far cadere o danneggiare l'apparecchio.

La batteria non può essere né caricata né maneggiata.

L'uso scorretto dell'apparecchio può posizionare il cavo in modo da causare pericolo d'inciampo.

Conservare l'apparecchio nella valigetta e fuori dalla portata dei bambini.



A terapia completa mettersi in contatto con Lüdi Medical Rehab AG per coordinare la spedizione di ritorno (si può incorrere in costi aggiuntivi in caso di resa ritardata).

Conservare la scatola d'imbballaggio per la spedizione di ritorno.

Partner del noleggio:

Lüdi Medical Rehab AG
Hans Huber-Strasse 38
4502 Solothurn
www.luedimedical.ch

Per qualsiasi domanda:



032/626 30 90


Lun – Ven 08:00 – 12:00
13:30 – 17:30

service@luedimedical.ch



Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate.

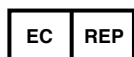

MED-RAS GmbH, Eichenallee 8H
21521 Wohltorf, Germania

Fabbricante legale:
Effectum Medical AG
www.effectummedical.com



usana**medical**

www.usamedical.com