



# CPM para el dedo del pie Hall-U-Sana®

## Guía rápida Español



# Ajuste del CPM para el dedo del pie

Realice el tratamiento únicamente mientras permanece sentado.

**PRECAUCIÓN:** No mueva el dispositivo.

El dispositivo debe estar apoyado de manera plana sobre el piso.

El inicio de la terapia se debe realizar como muy pronto 2 semanas después de la cirugía.



## 1 Colocación correcta del pie



Empuje el pie hasta el tope blanco: el pliegue del dedo del pie debe estar firmemente en contacto con el separador de dedos vertical (tope).

## 2 Fijación del pie con la correa para el pie



Ajuste la correa para el pie sobre el pie y fíjela con el velcro.

## 3 Fijación del dedo gordo al soporte del dedo



Coloque el dedo gordo del pie sin apretar sobre el deslizador del dedo (control deslizante), tire del deslizador hacia atrás lo máximo posible y asegure el dedo con la correa.

# Terapia

Durante 30 días, realice el tratamiento dos veces al día, por la mañana y por la noche, durante 25 minutos cada sesión. **Hay dos programas predefinidos:**

**1 Programa 1: menor deflexión del soporte del dedo**  
Recomendación: elija este programa para los primeros cuatro o cinco días de terapia.



**2 Programa 2: mayor deflexión del soporte del dedo**  
A partir del quinto día y solo si no hay dolor.  
Si hay dolor: detenga el programa 2 y continúe usando el programa 1.




## Controles operativos

Muestra el estado y el tiempo de tratamiento restante en minutos.

Botón INICIAR PAUSA: para encender y apagar el dispositivo, así como para iniciar o pausar un programa.



Indicador de carga de la batería. Si aparece el símbolo , póngase en contacto inmediatamente con su proveedor de servicio.

Botones para la selección directa del programa 1 o del programa 2.



## Procedimiento

### 1. Encendido

Mantenga presionado el botón INICIAR PAUSA durante 2 segundos.



### 2. Selección de un programa

Cuando encienda el dispositivo, el programa 1  siempre está preseleccionado (se ilumina en verde). Para seleccionar el programa 2, presione el botón  brevemente (a continuación se ilumina en verde).

### 3. Inicio del programa seleccionado

Presione el botón INICIAR PAUSA brevemente.

**4. Parada de emergencia en caso de dolor.** Presione de inmediato el botón INICIAR PAUSA brevemente.

### 5. Apagado

Mantenga presionado el botón INICIAR PAUSA durante 2 segundos.



### Mensaje de error

Anote el código de error, apague el dispositivo y póngase en contacto inmediatamente con su proveedor de servicio.

# Cuidado y devoluciones

Limpie el dispositivo únicamente con un paño húmedo.

Nunca lo limpie con agua corriente ni con productos químicos.

No deje caer ni dañe el dispositivo.

No cargue ni manipule la batería.

El cable puede suponer un riesgo de tropiezo si el dispositivo se utiliza de manera incorrecta.

Siempre mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños y guárdelo en su caja.



Una vez finalizado el tratamiento, póngase en contacto inmediatamente con su proveedor de servicio para coordinar la devolución (se pueden generar costos adicionales en caso de devolución tardía).

Conserve la caja de envío para la devolución.

## Servicio, soporte y distribución

Coloque aquí la etiqueta con la dirección.



### Instrucciones de uso

Lea atentamente las instrucciones de uso incluidas aquí.



MED-RAS GmbH, Eichenallee 8H  
21521 Wohltorf, Alemania



Effectum Medical AG  
Kirchgasse 11  
4600 Olten, Switzerland  
[www.effectummedical.com](http://www.effectummedical.com)



**usana**medical  
[www.usamedical.com](http://www.usamedical.com)